


Este produto é composto por:

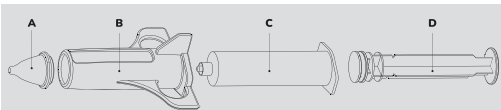

A - Adaptador Nasal de Silicone B - Capa da Seringa C - Seringa de 20 ml D - Haste da Seringa

01 - Cartela de Adesivos 01 - Manual de Instruções

Garantia ao consumidor

Garantia de 3 meses (noventa dias) contra defeitos de fabricação a partir da data de aquisição do produto e mediante apresentação de nota fiscal. A garantia não cobre uso incorreto, quebras ou perda de peças.

Informações técnicas

Dimensões: comprimento 85 mm / largura 45 mm / altura 127 mm

Peso do produto: 0,035 kg

Modelo: Dispositivo para lavagem nasal

Volume da seringa: 20 ml

Cadastro na ANVISA / MS nº: 82455370001

Responsável Técnico: Alexandre Baenci lack da Silva

CREA: 5069911310

Validade indeterminada; Produto não perecível.

Produto não estéril.

Armazenamento e transporte:

Temperatura: -20° C a +60° CC


Umidade: 10 a 95% UR - Sem condensação

Pressão Atmosférica: 700 hPa - 1060 hPa

Fabricado por ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 42.130.655/0001-24
Rua Pedro Ripoli, 2241 - Bairro Roncon
CEP: 09410-020 - Ribeirão Pires - SP
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Fone: (11) 5050-8007
E-mail: sac@enovamix.com.br
Site: www.enovamix.com.br




MANUAL DE INSTRUÇÕES DO USUÁRIO

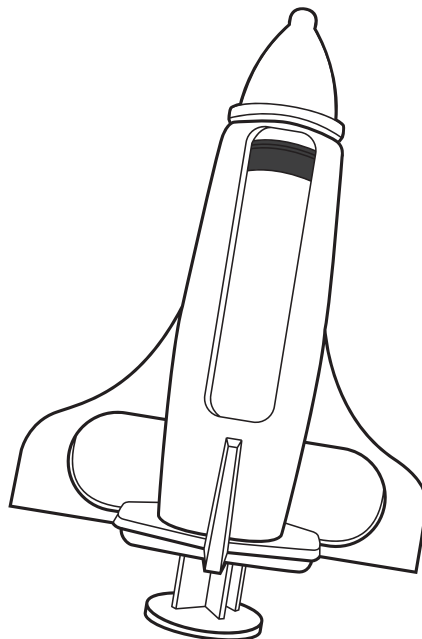

Limpeza e Higienização

Lave o dispositivo antes de usar pela primeira vez com água fria e sabão neutro. Enxágue bem, garanta que não restou nenhum resíduo e deixe secar naturalmente. Repita o mesmo processo após cada uso.

Antes de guardar, certifique-se que o dispositivo esteja completamente seco. Guarde em local limpo, sem umidade e calor excessivo.

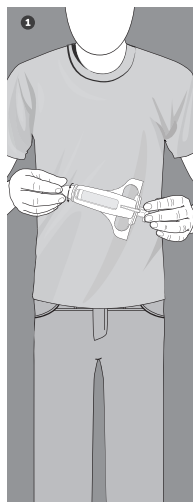

Após a limpeza, monte o dispositivo. Para melhor fixação do adaptador nasal de silicone na seringa, gire-o em sentido horário.



Coloque até 20 ml de soro fisiológico* no Dispositivo para Lavagem Nasal.
* Soro fisiológico não incluso.



Segure o dispositivo em uma das mãos e encaixe suavemente o Adaptador Nasal de Silicone em uma das narinas até vedar.



Sobre uma pia, incline a cabeça levemente no ângulo de 45°, conforme indicado na ilustração.



Pressione lentamente a haste da seringa para que o fluxo do soro fisiológico saia pela narina oposta, removendo as secreções.



Durante o processo de lavagem nasal respire pela boca. Faça o mesmo processo na outra narina. Ao final, assoe o nariz para expelir o excesso de soro e secreções. Se necessário repita a lavagem nasal. Sempre fazer a lavagem nasal sentado ou em pé. Produto reutilizável e de uso pessoal. Utilize o soro fisiológico (solução) de sua preferência. Soro fisiológico não incluso. Recomendamos a substituição deste Dispositivo a cada 06 meses.

Advertências

- Não compartilhe, produto de uso individual.
- Este dispositivo não é um brinquedo, não deve ser utilizado por crianças sem a supervisão de um adulto. Não utilize na boca ou ouvido.
- Insira delicadamente na narina até vedar. Nunca de forma brusca ou muito profunda.
- Não morder ou tentar mastigar este dispositivo. Manter fora do alcance de crianças.
- Pessoas acometidas de restrições físicas, sensoriais ou mentais devem ser acompanhadas durante o uso.
- Nunca utilize água fervente, esterilizantes, forno de micro-ondas, autoclaves ou aplique qualquer fonte de calor no produto. Este dispositivo é composto por peças plásticas que podem ser danificadas e essas ações não se enquadram nos termos de garantia.
- Não utilize álcool ou abrasivos para efetuar a limpeza.
- A seringa é de uso exclusivo do **DISPOSITIVO PARA LAVAGEM NASAL ENOVAMIX**, não deve ser utilizada para qualquer outra finalidade.

O Dispositivo para Lavagem Nasal Enovamix é um condutor de líquidos para higienização nasal e sua indicação deve ser de acordo com a orientação de um médico ou especialista. Informações importantes como: volume (ml) de soro fisiológico a ser utilizado, temperatura ideal e periodicidade de aplicação são individualizadas.