

GARANTIA AO CONSUMIDOR

Garantia de 3 meses (noventa dias) contra defeitos de fabricação a partir da data de aquisição do produto e mediante apresentação de nota fiscal de compra.

A garantia não cobre uso incorreto, quebras ou perda de peças. Os componentes do produto não são vendidos separadamente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (mm): comprimento 230mm e diâmetro 53mm

Peso (Kg): 0,125 kg

Volume do espaçador: (160 à 210ml)

Câmara espaçadora - 160 ml

Câmara com prolongador - 210 ml

Conteúdo da embalagem: 01 bico-boquilha, 01 câmara espaçadora, 01 adaptador com encaixe universal, 01 membrana de silicone, 01 prolongador da câmara, 01 máscara adulto, 01 máscara adolescente, 01 máscara bebê-infantil e 01 manual de instruções.

Cadastro na ANVISA / MS nº: 82455379001

Responsável técnico: Alexandre Baenci lack da Silva

CREA: 5069911310

Produto não perecível.

Validade indeterminada.

Produto não estéril.

Pode ser reutilizado.

Armazenamento e Transporte

Temperatura: - 20°C a 60°C

Umidade: 10 a 95% UR – Sem Condensação

Pressão Atmosférica: 700hPa 1060hPa

Fabricado por ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA.

CNPJ: 42.130.655/0001-24

Rua Pedro Ripoli, 2241 – Bairro Roncon

CEP: 09410-020 – Ribeirão Pires – SP

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor

Fone: (11) 5050-8007


E-mail: sac@enovamix.com.br

Site: www.enovamix.com.br

Código: 95.009.000



ESPAÇADOR UNIVERSAL

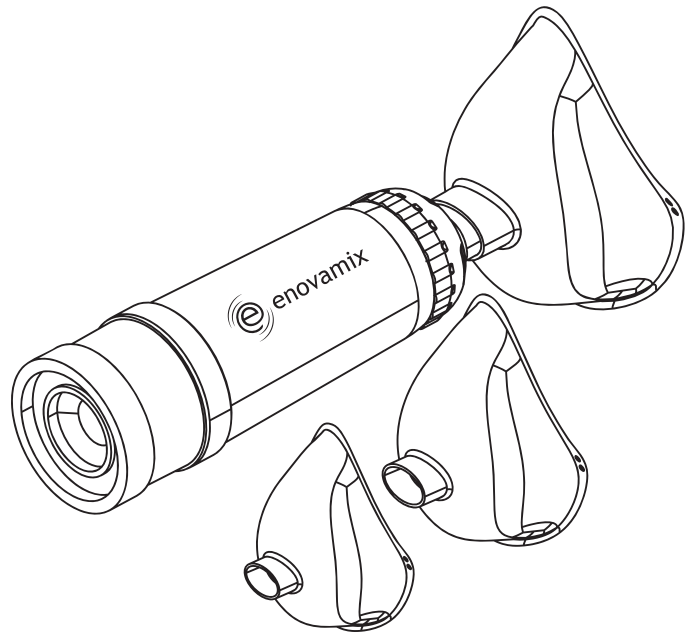


Manual de Instruções do Usuário

.....

- Antes de utilizar o **Espaçador Universal Enovamix** leia o Manual de instruções.
- Este espaçador não é esterilizado. Realize a higienização conforme descrito no campo "**INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**" antes e após o uso.
- Utilize o espaçador conforme prescrição médica, obedecendo a quantidade de inspirações do medicamento solicitada. **Evite a automedicação.**
- O **Espaçador Universal Enovamix** não deve ser utilizado por crianças sem a supervisão de um adulto.
- **Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**
- Pessoas acometidas de restrições físicas, sensoriais ou mentais devem ser acompanhadas durante o uso.
- O produto estará em seu pleno funcionamento somente se todos os componentes estiverem montados conforme o campo "**MONTAGEM DO ESPAÇADOR**". O mesmo só deve ser desmontado para limpeza.
- Nunca utilize água fervente, esterilizantes, forno de micro-ondas, autoclaves ou aplique qualquer fonte de calor no produto. Este espaçador é composto por peças plásticas que podem ser danificadas e essas ações não se enquadraram nos termos de garantia.
- Antes de utilizar o espaçador, certifique-se que não existe nenhum objeto no interior da câmara.
- Não utilize o produto para outra finalidade que não seja indicada nesse manual.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

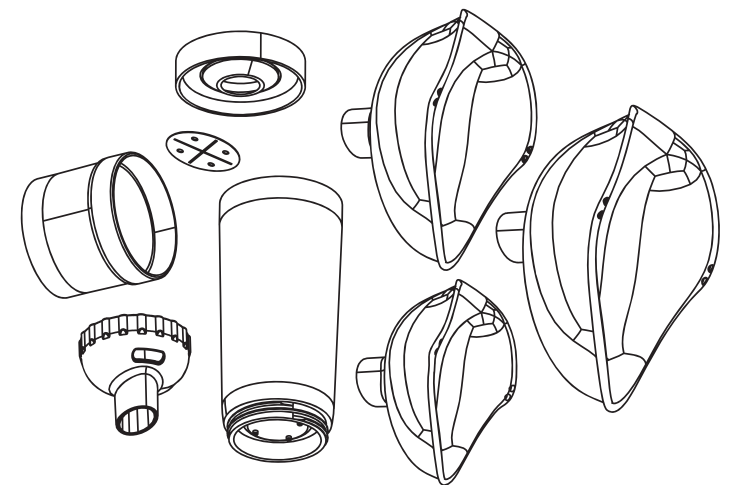


O **Espaçador Universal Enovamix** foi desenvolvido para administrar medicamentos spray em forma de aerossol (bombinhas) e auxiliar no tratamento de doenças respiratórias. É um espaçador versátil para atender todas as idades, com exclusivo prolongador que permite ajustar o tamanho da câmara espaçadora (160-210ml). Com encaixe universal e compatível com diferentes bombinhas. Acompanha 3 máscaras: tamanhos bebê-infantil, adolescente e adulto, são leves e se adaptam ao formato do rosto para o conforto na utilização.

APRESENTAÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO

Antes do uso, efetue os processos de limpeza no espaçador, conforme descrito no campo “**INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**”. E monte o produto corretamente, conforme orientado na ilustração “**MONTAGEM DO ESPAÇADOR UNIVERSAL ENOVAMIX**”.

Para iniciar a utilização, escolha a forma de uso:

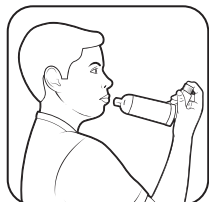

Para inalação oral: utilize diretamente o bico-boquilha.



Para inalação nasal: encaixe no bico-boquilha a máscara de sua preferência: bebê-infantil, adolescente ou adulto, conforme tamanho adequado para o rosto. Utilize apenas uma máscara por inalação.

Inspire lentamente o medicamento segurando a respiração de 5 a 10 segundos e expire normalmente. No caso de prescrição de 2 ou mais jatos da medicação, aguarde 30 segundos para a próxima aplicação.

O aerossol deve ser agitado antes de cada uso.

Observação: Sempre siga a recomendação do seu médico, obedecendo a quantidade de inspirações do medicamento solicitada.

Escolha o tamanho da câmara espaçadora de acordo com a sua necessidade:




Para utilização em bebês ou crianças recomendamos o uso somente da câmara espaçadora (160ml).



Para uso em adolescentes e adultos, recomenda-se a utilização da câmara espaçadora com o prolongador (210ml).



Retire a tampa do aerossol (bombinha), agite bem para assegurar a liberação adequada da medicação.

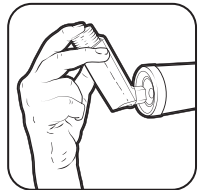


Conecte o aerossol (bombinha) no adaptador com encaixe universal do espaçador.




Para inalação nasal, posicione a máscara no rosto sobre o nariz e a boca (observe se o nariz e boca estão totalmente dentro da máscara). Ou se preferir, posicione diretamente o bico-boquilha entre os lábios e realize inalação via oral. Pressione o jato do aerossol (bombinha) apenas uma vez.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

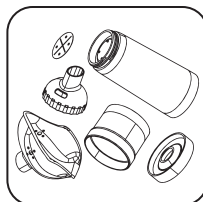

Desmonte todos os componentes do **Espaçador Universal Enovamix**: Adaptador com encaixe universal, prolongador da câmara espaçadora (caso esteja em uso), câmara espaçadora, bico-boquilha, membrana de silicone e a máscara que estiver em uso.

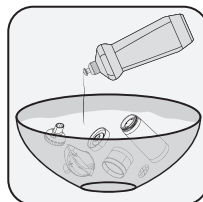

Lave e higienize todas as peças com água, detergente neutro ou uma solução germicida de sua preferência e enxague com água. Recomenda-se o uso de água filtrada. Retire o excesso de água e deixe secar naturalmente.

Não seque nem esfregue o interior da câmara espaçadora e do prolongador com panos, toalha de papel ou qualquer outro tipo de tecido.

Certifique-se que todos os componentes do espaçador estejam secos antes de montá-los.

Após a secagem monte o espaçador e guarde em local apropriado (limpo, seco e longe de calor excessivo).


Para montagem ou desmontagem utilize a ilustração “**MONTAGEM DO ESPAÇADOR UNIVERSAL ENOVAMIX**” e deixe-o pronto para uso.

IMPORTANTE:

Não utilize álcool ou abrasivos para efetuar a limpeza. Só desmonte o espaçador para efetuar a limpeza.

Nunca utilize água fervente, esterilizantes, forno de micro-ondas, autoclaves ou aplique qualquer fonte de calor no produto. Este espaçador é composto por peças plásticas que podem ser danificadas e essas ações não se enquadram nos termos de garantia.

MONTAGEM DO ESPAÇADOR UNIVERSAL ENOVAMIX

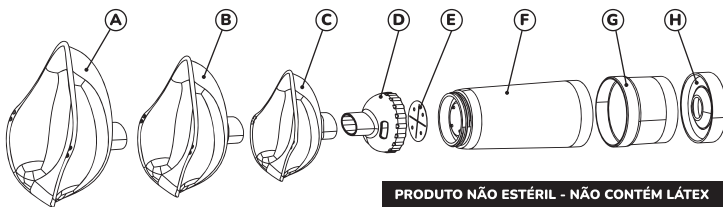

PRODUTO NÃO ESTÉRIL - NÃO CONTÉM LÁTEX

A) Máscara adulto **B)** Máscara adolescente **C)** Máscara bebê-infantil
D) Bico-boquilha **E)** Membrana de silicone **F)** Câmara espaçadora
G) Prolongador da câmara **H)** Adaptador com encaixe universal

IMPORTANTE!

Para a montagem correta do espaçador, observar se a membrana de silicone está totalmente encaixada nos pinos guias e se o bico-boquilha está totalmente rosqueado.

