

GARANTIA AO CONSUMIDOR

Garantia 3 meses (noventa dias) contra defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição do produto e mediante apresentação de nota fiscal. A garantia não cobre uso incorreto, quedas ou perda de peças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (mm): altura 70 x largura 50 mm x comprimento 50 mm
Peso (Kg): 0,200 kg
Conteúdo da embalagem: 01 micronebulizador (reservatório, tampa e anteparo), 01 extensão do micronebulizador, 01 adaptador universal, 01 conector universal do micronebulizador, 01 máscara bebê-infantil, 01 máscara adolescente, 01 máscara adulto e 01 manual de instruções.

A taxa de nebulização pode variar de acordo com a fonte de inalação utilizada.

Cadastro na ANVISA / MS nº: 82455379006
Responsável técnico: Alexandre Baenci lack da Silva
CREA: 5069911310
Produto não perecível.
Validade indeterminada.
Produto não estéril.
Pode ser reutilizado.

Armazenamento e Transporte

Temperatura: - 20°C a +60°C
Umidade: 10 a 95% UR – Sem Condensação
Pressão Atmosférica: 700hPa 1060hPa

Fabricado por ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ: 42.130.655/0001-24
Rua Pedro Ripoli, 2241 – Bairro Roncon
CEP: 09410-020 – Ribeirão Pires – SP

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor
Fone: (11) 5050-8007
E-mail: sac@enovamix.com.br
Site: www.enovamix.com.br


Código: 95.0025.000

- Antes de utilizar o Micronebulizador Universal leia o Manual de instruções.
- Realize a higienização conforme descrito no campo "INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO" antes e após o uso.
- Utilize no micronebulizador somente soluções e quantidades prescritas pelo seu médico. Evite a automedicação.
- Não ultrapassar a capacidade máxima indicada no reservatório.
- Medicamentos e ou soluções à base de óleo ou muito densos, como cremes e pastas, não devem ser utilizados, pois podem danificar o produto.
- O Micronebulizador Universal não deve ser utilizado por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Pessoas acometidas de restrições físicas, sensoriais ou mentais devem ser acompanhadas durante o uso.
- O produto estará em seu pleno funcionamento somente se todos os componentes estiverem montados conforme o campo "MONTAGEM DO MICRONEBULIZADOR". O mesmo só deve ser desmontado para limpeza.
- Não utilize o produto para outra finalidade que não seja indicada neste manual.
- Nunca utilize água fervente, esterilizantes, forno de micro-ondas, autoclaves ou aplique qualquer fonte de calor no produto. Este micronebulizador é composto por peças plásticas que podem ser danificadas e essas ações não se enquadram nos termos de garantia.
- Este micronebulizador é de uso individual. Para evitar infecções e contaminações, siga as orientações conforme descrito em "INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO".
- Antes de utilizar, certifique-se que as peças necessárias para inalação estão corretamente encaixadas.
- Na montagem, verifique se há objetos que não façam parte do produto, se houver remova.
- Não faça modificações no produto, não altere ou alargue o diâmetro na saída de ar do reservatório ou do anteparo, isto danifica o micronebulizador e encerra a garantia.
- No uso hospitalar, siga as instruções e procedimentos adotados pelo hospital.


PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS



MICRONEBULIZADOR UNIVERSAL

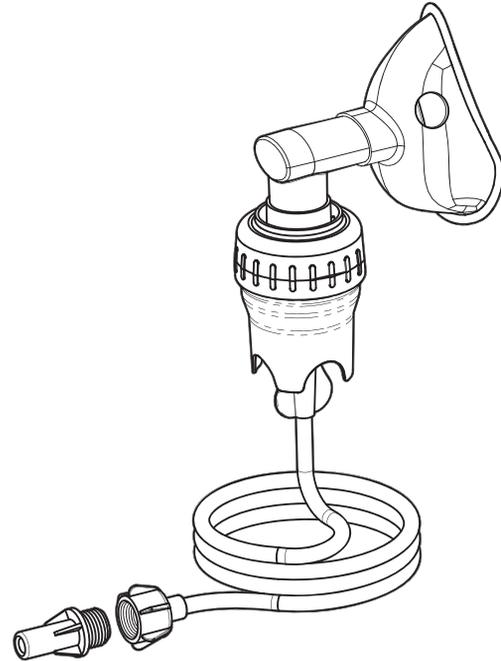

Manual de Instruções do Usuário

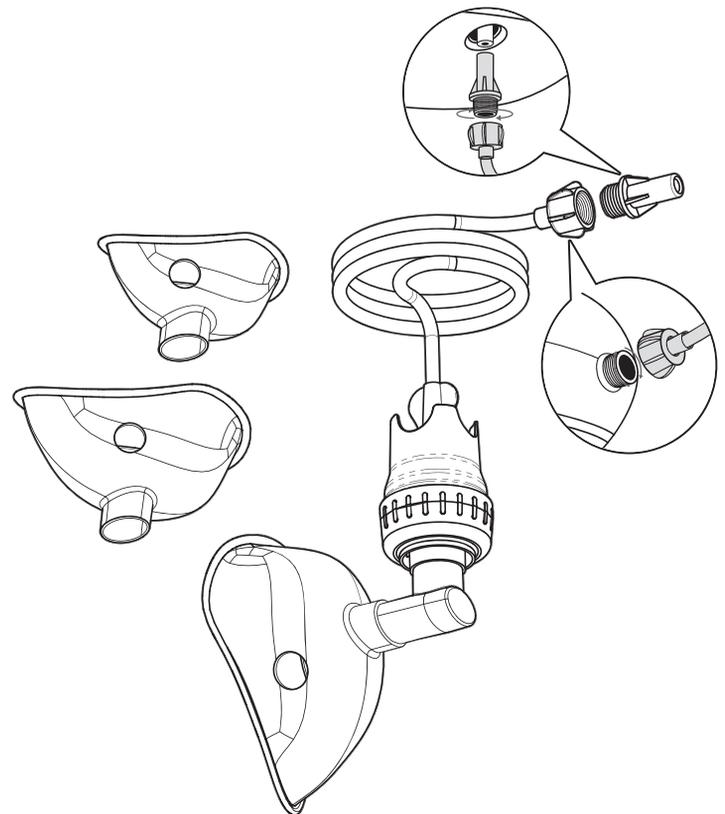

O Micronebulizador possui exclusivo conector universal com rosca e encaixe (sistema patenteado), que permite a utilização em variados modelos de inaladores compressores mecânicos e de ar comprimido. Acompanha 03 máscaras tamanhos: bebê-infantil, adolescente e adulto, são leves e se adaptam ao formato do rosto para conforto na utilização.

APRESENTAÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO



Para iniciar a utilização, desencaixe a tampa do reservatório suavemente em sentido anti-horário.



Verifique se o anteparo está posicionado corretamente no reservatório.



Adicione a solução a ser inalada, dentro do reservatório, não excedendo o limite máximo indicado.




Coloque a tampa no reservatório, certifique-se que o encaixe está correto e gire levemente no sentido horário.




Conecte a extensão na base do reservatório do micronebulizador.

Em seguida, verifique o encaixe do equipamento que irá utilizar. São duas opções:

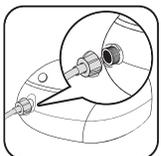

Para equipamentos com saída de ar rosqueável utilize diretamente o conector com rosca da extensão.

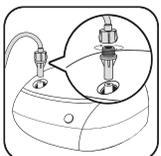


Em equipamentos com saída de encaixe, rosqueie o conector universal na extensão e conecte no aparelho.




No micronebulizador, conecte o adaptador universal na tampa do reservatório e encaixe a máscara a ser utilizada.

Obs: Não incline o micronebulizador mais que 45°, pois o medicamento/solução pode derramar. Não agite durante o uso.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

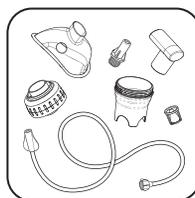

Desmonte todos os componentes do **MICRONEBULIZADOR UNIVERSAL**: máscara, extensão, anteparo, conector, adaptador universal e tampa do reservatório.

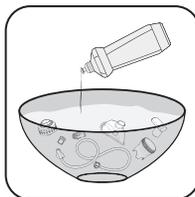

Lave e higienize todas as peças com água, detergente neutro ou solução germicida de sua preferência e enxague com água. Retire o excesso de água e deixe secar naturalmente.

Certifique-se que todos os componentes do micronebulizador estejam secos antes de montá-los.

Após seco, monte o micronebulizador e guarde em local apropriado (limpo, seco e longe de calor excessivo).

Para montagem ou desmontagem utilize a ilustração “**MONTAGEM DO MICRONEBULIZADOR UNIVERSAL**” e deixe-o pronto para uso.


Atenção:

Não utilize álcool ou abrasivos para efetuar a limpeza. Nunca utilize água fervente, esterilizantes, forno de micro-ondas, autoclaves ou aplique qualquer fonte de produto.

Este micronebulizador é composto por peças plásticas que podem ser danificadas e estas ações não se enquadram nos termos de garantia.

MONTAGEM DO MICRONEBULIZADOR UNIVERSAL

PRODUTO NÃO ESTÉRIL - NÃO CONTÉM LÁTEX

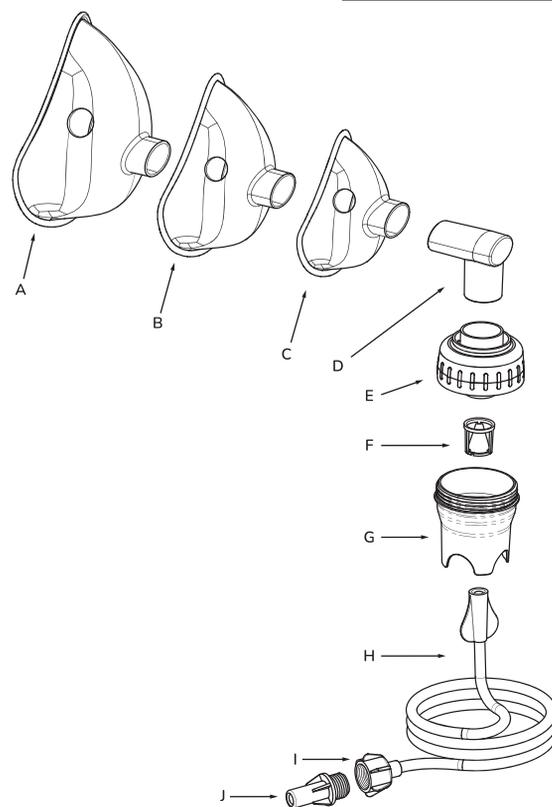

- | | |
|--|---|
| A) Máscara adulto | F) Anteparo do micronebulizador |
| B) Máscara adolescente | G) Reservatório do micronebulizador |
| C) Máscara bebê-infantil | H) Extensão do micronebulizador |
| D) Adaptador universal | I) Conector com rosca da extensão |
| E) Tampa do reservatório do micronebulizador | J) Conector universal do micronebulizador |